

承認番号 : 22500BZX00545000
インジェクター-PLUS : 16B2X10005000006

針なし注射器

歯科麻酔用

Injex50



**Aijex
Medical**

針が無い、針の痛みが無い

針なし注射器による 歯科予備麻酔



- 軽度な歯科治療
- 本麻酔前の予備麻酔

- **歯肉頬移行部粘膜**にしっかり押し当てる
- 粘膜下に注入する

電話

メール

お問い合わせ



03-6868-8323

info@aijex-medical.com



〒106-0032 東京都港区六本木3-7-1-1008 株式会社 アイジェックス・メディカル

「Injex50」の特徴

快適性

- 注射針を使わず噴射により薬液を注入
- 無痛治療の実現

安全性

- 使い捨てアンプルで感染防止
- 針刺し事故の危険を低減

効率性

- 表層麻酔を広範囲に効かせることが出来る(半径1～1.5cm)
- 治療時間の短縮(約20秒で麻酔効果)

廃棄性

- 使用済みアンプルは安全に廃棄物として廃棄できる

痛みがなく、治療時間が短縮できる 針なし注射器による歯科予備麻酔

◆適用症例

軽度な歯科処置および、本麻酔前の予備麻酔等

◆痛みの無い打ち方のポイント

- ・ **歯肉頬移行部粘膜**にしっかりと密着
- ・ 粘膜下に注入する
- ・ 打ち終わった後も2～3秒押し当て続ける



麻酔薬をアンプルへ移送



麻酔薬を充填したアンプルをインジェクター PLUS に装着



インジェクター PLUS の調整棒を回して、アンプル先端から麻酔薬が出るかを確認



付着歯肉下の粘膜部に向けて打つ (注射量が少ない場合)



歯頬移行部の柔らかい場所に向けて打つ

準備と使用手順

1. 歯科用麻酔カートリッジにアダプターを装着
 2. アンプルをアダプターに差し込み薬剤を充填する (**0.1～0.5mL**)
 3. リセットボックスを使用してインジェクター内にあるスプリングをリセット
 4. アンプルをインジェクターに、しっかりとねじ込んで装着
 5. **使用する量に合わせ、インジェクター後端の調整棒を回して調整
液量は0.1～0.5 ml まで自由に調整可能**
 6. シリトップをアンプルの先に装着
 7. インジェクターのブルーの安全装置を上げて解除
 8. 打ち終わった後も2～3秒押し当て続ける
 - アンプルは単回使用、アダプター、シリトップは滅菌により繰り返し利用可能
- (バネの劣化を防ぐため、インジェクターをリセットボックスに入れたまま保管しないでください)

スライド動画



実践編動画



**Aijex
Medical**

株式会社 アイジェックス・メディカル
03-6868-8323

info@aijex-medical.com

〒106-0032 東京都港区六本木3-7-1-1008

