

針なし注射器「INJEX50」へのお問い合わせ誠にありがとうございました。  
他にご質問がありましたら、何なりとご連絡ください。

## 【 ご質問の多い項目 】

### ● 仕組み

「INJEX50」はバネの力を使い、高圧・微細なジェット流により薬液を皮下に送りこむシステムとして、医科向けに開発されました。さらに射出の圧力などの開発を重ね歯科麻酔向けに販売するに至りました。

針で刺す痛みがなく針に対する恐怖心がある患者様にも安心してお使いいただけます。

TV でのご紹介 <https://youtu.be/NtAAp3atL6s> (限定公開)

### ● 価格について、ランニングコストについて

本体定価が 158,000 円、とさせて頂いております。AIJEX MEDICAL にお問い合わせ頂ければ、特別価格でご提供申し上げます。他にアダプター、シリトップという部材がありますが、滅菌により再利用が可能です。

お問い合わせページ <https://aijex-medical.com/contact>

### ● デモ器について

デモ器のご要望が多く、お貸出に時間がかかっておりますが、ご要望がありましたらお知らせください。  
なお医療関係者のみとなります。

お問い合わせページ <https://aijex-medical.com/contact>

### ● シリジェットとの比較について

<https://aijex-medical.com/news/903.html>

小さく、軽量のため取り扱いが容易です。また注射アンプルがディスポのため、使用毎の洗浄の手間がなく衛生的で便利です。(1回毎のコストがかかります)

### ● 滅菌処理

インジェクター本体は外側はステンレスですが、内部のバネやプラスチック部品もあり、オートクレーブなどに入れての滅菌処理は出来ません。

本体を市販のハンドピーススリーブ (<https://dental.feed.jp/product/500148820.html>) を被せて使用することは可能です。

アンプルは単回使用、シリトップ、アダプターはオートクレーブでの滅菌処理は可能です。

### ● ご購入方法

ご購入頂ける場合は、こちらのメール、添付の発注書でのお申し込みで特別料金にてお届け致します。  
(後日、銀行へのお振込)

お問い合わせページ <https://aijex-medical.com/contact>

### ご参考動画

使い方

<https://youtu.be/ftfR3-8L00c>

歯科医による歯科麻酔 (実践編~0.5ml を歯肉頬移行部に打つ場合)

<https://youtu.be/pz6KNPqgM48>

医師による実際の使用例

<https://www.youtube.com/watch?v=4RfO9BqQEY0>

調整型で 0.2ml を打つ場合

① <https://youtu.be/juLuU9y18l8>

② <https://youtu.be/xlK2EpMoaoM>

③ <https://youtu.be/NCzvex1gyOQ>

●導入クリニック一覧（一部）

<https://aijex-medical.com/clinics>

ご質問など、お気軽にご連絡ください。  
ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。



株式会社アイジェクス・メディカル

<https://aijex-medical.com/>

〒106-0032 東京都港区六本木 3-7-1-1008

TEL : 03-6886-1505

[info@aijex-medical.com](mailto:info@aijex-medical.com)